

MEG 2

Damar Mühürleme Cihazı



MEG 2 Damar Mühürleme uygulamaları için modifiye edilmiş ve uzmanlaşmış bir elektrocerrahi jeneratörüdür. Ayrıca, genel ameliyatlarda daha fazla ihtiyacı karşılamak için Otomatik Başlatma ve Otomatik Durdurma işlevlerine sahip geleneksel Bipolar Koagülasyon sağlar.

Özellikler:

- Damar Mühürleme Sistemi artı geleneksel Bipolar Koagülasyon
- Farklı tipteki damar kapama aksesuarlarıyla uyumlu
- Farklı cerrahi işlemlere izin veren iki damar kapama modu
- Optimum doku koagülasyonu için Bipolar Auto Start ve Auto Stop modları (Doku karbonizasyonunu önler)




Tüm markalar ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Şebeke Gerilimi: 220 V AC $\pm$ %10, 50 Hz (110 V AC Opsiyonel)
Maksimum Güç Tüketimi: 700 V.A
Koruma Sınıfı: Class I
Çıktı Türü: CF
Ağırlık: 6,8 kg
Boyutlar (G.H.D): 37 x 16 x 46 cm

ÖN PANEL BİLGİLERİ

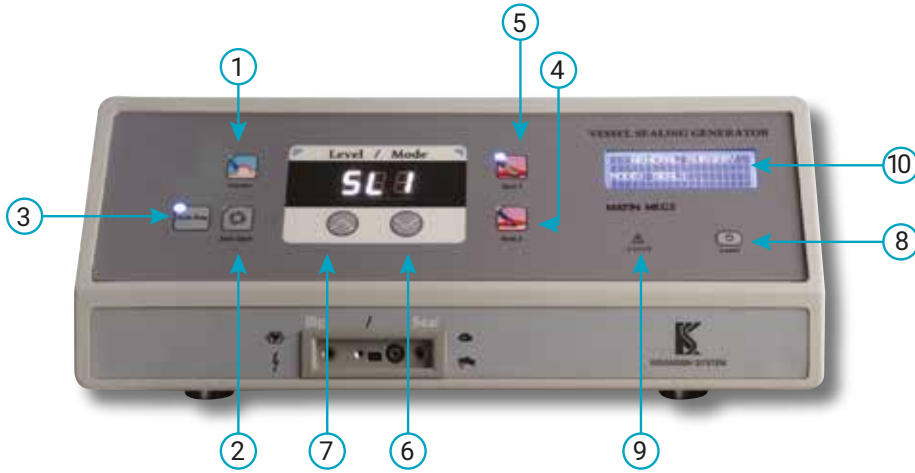

1- Bu gösterge ışığı manuel Bipolar Koagülasyon'u seçer. Bipolar çıkış sadece ayak pedalına basılarak etkinleştirilir.

2- Bu buton ve gösterge ışığı, hasta ve kullanıcı güvenliği için 0,5 saniye gecikmeli Otomatik Başlatma modunu seçer. Ayak pedalına basıldığında Otomatik Başlatma modunun manuel moda geçeceğini belirtmekte fayda var.

Auto Start Bipolar Koagülasyon: Bipolar çıkış, pensetin iki ucu dokuya temas ettikten sonra etkinleştirilir.

- 3- Bipolar Koagülasyon için Otomatik Durdurma modu seçim butonu
- 4- Seal 2 (Damar Mühürleme) modu seçim düğmesi
- 5- Seal 1 (Damar Mühürleme) modu seçim düğmesi
- 6- 7. Bipolar Koagülasyon çıkış gücü ayar düğmeleri
- 8- Bekleme Modu düğmesi

Konvansiyonel Bipolar Koagülasyon:

- Sürekli sinüs dalgası
- Doku karbonizasyonu olmadan yapışma önleyici etkiye sahip bipolar koagülasyon
- Koagülasyon için ayak pedalı ve otomatik başlatma (doku sensörü) aktivasyonu

Konvansiyonel Bipolar Koagülasyon için Auto Stop Sistemi:

- Doku empedans sensörleri, karbonizasyon veya elektrot yapışmasından önce koagülasyon optimum seviyeye ulaşır ulaşmaz jeneratörü kapatır
- Ayak pedalı veya parmak butonu değiştirme olmadan forseps ile tam otomatik bipolar koagülasyon mümkündür.

